

保管用 附保修卡

YĀMAN
TOKYO JAPAN

产品使用说明书

PSM300多效美容仪

目录

第一章 设备描述	01
仪器简介	01
产品工作原理	01
设备组成	01
第二章 结构组成	02
设备外观	02
第三章 工作条件及技术指标	03
正常工作条件	03
主要技术指标	03
第四章 安装与调整	04
接货/验收	04
开机前的准备	04
第五章 操作方法	07
参数设置流程	07
操作步骤	09
护理时间	18
操作程序一览表	18
第六章 保养及常见问题解决方法	20
常见故障排除	20
清洁	21
水箱保养	21
第七章 安全及注意事项	22
第八章 运输、贮存	25
第九章 内置充电锂电池的废弃方式	26
第十章 环保清单	27
第十一章 售后服务	28

前言

感谢您选择PSM300多效美容仪！

请阅读下面关于该产品的说明和“安全注意事项”。

在每一章里还可以获得更为详细的信息。

使用本设备前，请仔细阅读并特别关注使用条款的相关说明。

■ 使用前需知

- 护理头不得用于眼球区域。
- 护理头建议搭配原厂配套妆品使用。
- 仪器必须由经厂方培训的授权美容师使用。
- 仪器发生故障时应由经培训合格的专业人员维修或寄修进行解决。

警告

- 若不按此说明书使用、调整或不按规定要求执行各操作步骤，可能会引起设备损坏或对人体的伤害

第一章 设备描述

■ 仪器简介

PSM300多效美容仪以及配套妆品，主要从里到外，内外联合，改善肌肤问题，仪器需要通过专业培训的美容师进行服务。

■ 产品工作原理

PSM300多效美容仪采用CERTEC双聚能效应技术，联合专研PSN能量（促渗、增效、减负）协同技术，从里到外，内外联合，美容肌肤。

■ 设备组成

由主机箱体、主控制电路部分、软件操作控制部分、五大护理模块组成。

五大护理模块：


- 紧致手柄（CERTEC）
- 提拉手柄(fNMES)
- 促渗手柄(DWHP)
- 冰敷手柄（FROZEN）
- 聚光舱(360° CAPSULE)

第二章 结构组成

■ 设备外观


本体

- 各部位的名称及功能（本体）

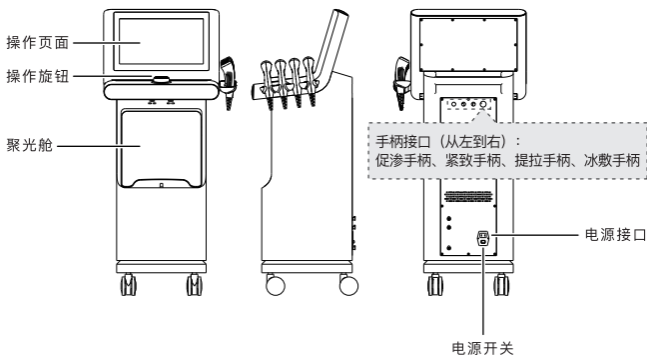

配件

- 各部位的名称及功能（配件）

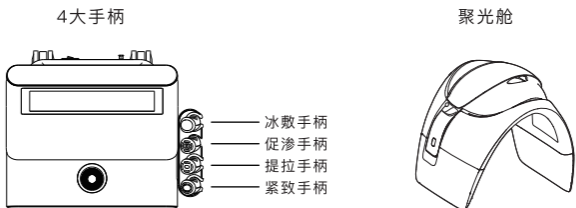

第三章 工作条件及技术指标

■ 正常工作条件

环境条件

温度：5℃~40℃；

相对湿度≤80%；

大气压力：700 hPa~1060 hPa。

电源条件

额定电压：100-240V~ 50/60Hz；

额定功率：150W Max；

■ 主要技术指标

产品型号：PSM300

外形尺寸：550mm×450mm×1200mm

重量：30kg

执行标准:GB4706.1-2005\GB4706.15-2008合格

第四章 安装与调整

■ 接货/验收

- 到货后，首先要检验外包装在运输上是否有损坏。如果有，应立即申报承运人。
- 打开机器包装仔细检查运输中有否损坏，按设备装箱清单一一核对，将包装保存起来以备日后使用。
- 仔细记录设备编号并放置在安全的地方以备日后发货时使用，不要将护理模块放在污浊和灰尘的环境中，空气将灰尘带进护理模块将会缩短设备寿命。

■ 开机前的准备

① 给水箱加水

- 开机前，请给水箱加水，完成加水后再进行电源接口和手柄的安装。
- 加水时，请将水管插入进水口进行加水，同时将另一根水管插入溢水口，防止加水过量，当水量过多时多余的水将从溢水口水管排出；
- 排水时请将水管插入排水口进行放水，同时将另一根水管插入溢水口，防止形成负压，确保能够顺利排水（如图4-1）。

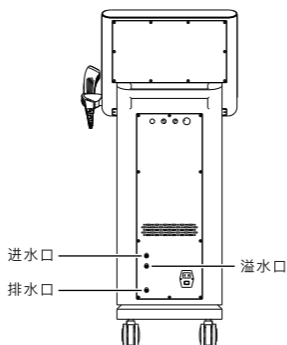


图4-1

第四章 安装与调整

② 安装电源接口

- 先将电源线连接仪器背面下方的电源接口处（如图4-2），再接通电源。

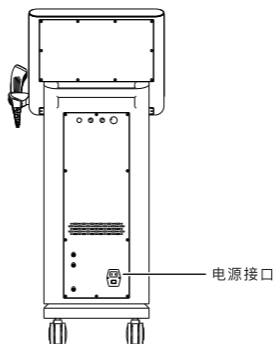


图4-2

③ 安装手柄模块

- 每个手柄插头与机身上都设有特定的凹槽，安装时直接对准凹槽插入即可，勿暴力插入，以免损坏仪器或配件插头（如图4-3）。



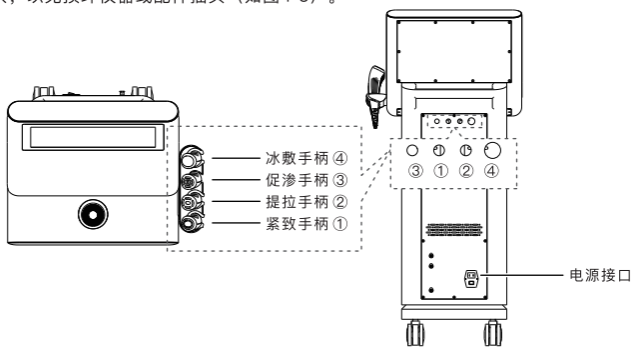


图4-3

第四章 安装与调整

④ 安装聚光舱

- 安装完手柄模块后,聚光舱接通电源,需要将线缆与小车指定接口连接(如图4-4)。

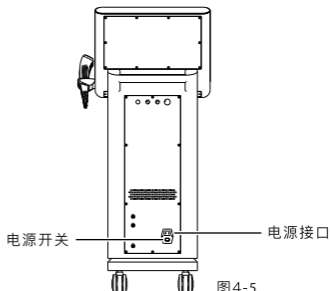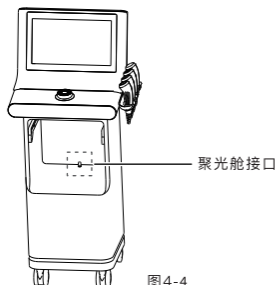

- ⑤ 设备电源线插入有电网电源输出(100-240V)的插座上;
- ⑥ 按下机身后的电源开关,设备进入操作界面(如图4-5);
- ⑦ 通过扫码验真进入操作程序界面;
- ⑧ 依项目操作流程,按下相对应的功能键,操作完一个流程,放好手柄,选择进入下一个功能;
- ⑨ 手柄操作完需归位,放置于手柄支架的特定凹槽内,以免手柄掉落;
- ⑩ 项目操作完成,按机身后电源开关关机,并及时清洁手柄、机身。

第五章 操作方法

注：各护理模块的操作界面不一样，具体操作方法详见各护理模块部分说明书。

■ 参数设置流程

- 连接好仪器电源，手柄探头保持清洁干净；
- 各护理模块的护理时间设置不一样，具体设置参照各护理模块部分说明书；
- 通过前期询问用户需求，调节仪器参数（音量/背景音量调节/亮度调节），并保存设置（如图5-1）。

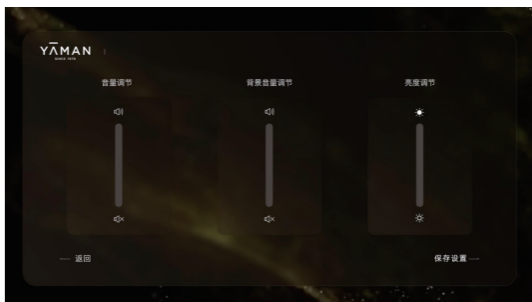


图5-1：参数调节页面

第五章 操作方法

- 屏幕灯带颜色设置

在设置页面点触摸左上角“YAMAN”的“Y”一次进入页面。根据需求，在该页面调节屏幕下方灯带颜色的参数设置，分别代表R-红光，G-绿光，B-蓝光（如图5-2）。

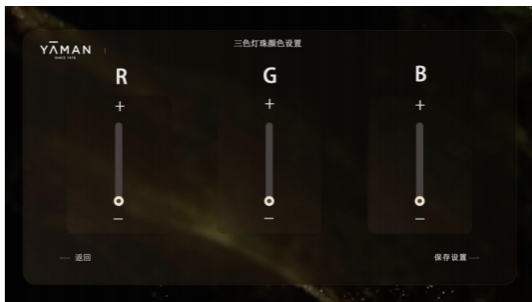


图5-2：屏幕灯带颜色设置页面

第五章 操作方法

■ 操作步骤

● 页面启动

接通电源后，操作页面亮起，点击触摸屏幕“开始使用”，进入选择模式使用（如图5-3）；点击触摸屏幕右上角语言切换图标，可切换设置字体语言，包括简体中文、英语、繁体中文（更多字体语言将持续更新）。

注：国内版本无切换语言功能，以仪器实物为准



图5-3：开始页面

● 扫码验真

- 进入模式界面后，任选3个模式，弹出仪器二维码界面，扫描仪器码以及耗材码后，进入模式选择功能。
- 当使用时长达到40分钟，将会跳出弹窗，用户可选择是否继续护理，如选择结束护理，设备将返回初始页面，下次使用需重新扫码；如用户选择继续护理，则设备将可以继续使用90分钟，结束后再返回初始页面。
- 当使用时长未达到40分钟，用户自主选择结束护理并返回初始页面，则在下次使用时也需要重新扫描仪器和耗材码。

第五章 操作方法

● 选择模式

进入选择模式页面，根据用户的需求，点击操作面板选择相对应的模式进行护理（如图5-4）。



图5-4：模式选择页面

舒缓模式

舒缓模式有4大步骤，共需要6次护理，期间间隔建议7-10天/次，一次护理40分钟（如图5-5）。

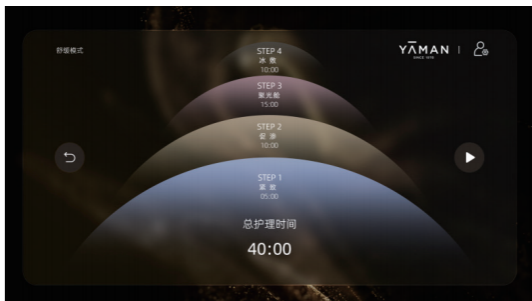


图5-5：舒缓模式主页面

第五章 操作方法

- ①紧致手柄+沁肤盈润精华乳，护理时长默认5分钟，可调节至最大时长30分钟（如图5-6）。

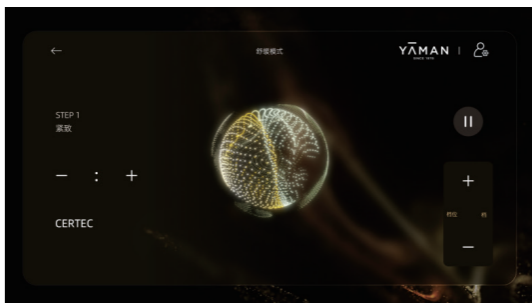


图5-6：舒缓模式-紧致手柄页面

- ②促渗手柄+水凝臻护精华液，护理时长默认10分钟，可调节至最大时长30分钟（如图5-7）。

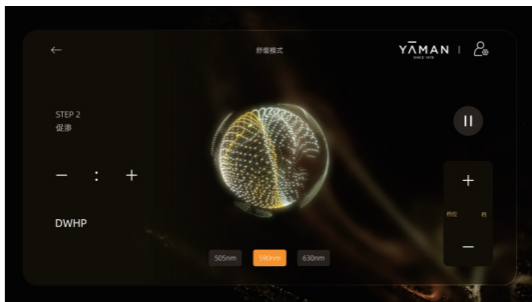


图5-7：舒缓模式-促渗手柄页面

第五章 操作方法

③短按聚光舱面罩镜腿处电源键，选择“强效舒缓”模式，模式护理时长默认15分钟，如果屏幕调节增加时长，则聚光舱需要手动重新选择和开启（如图5-8）。

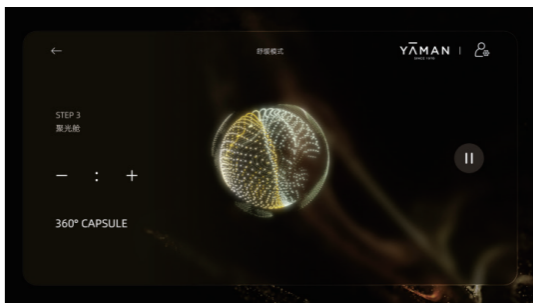


图5-8：舒缓模式-聚光舱页面

④冰敷手柄+水凝臻护精华冻膜，护理时长默认10分钟，可调节至最大时长30分钟（如图5-9）。

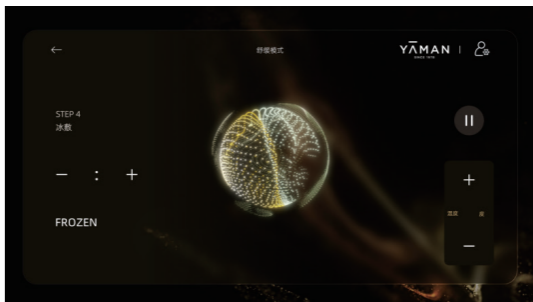


图5-9：舒缓模式-冰镇手柄页面

第五章 操作方法

紧致模式

紧致模式有4大步骤，共需要6次护理，期间间隔建议7-10天/次，一次护理40分钟（如图5-10）。

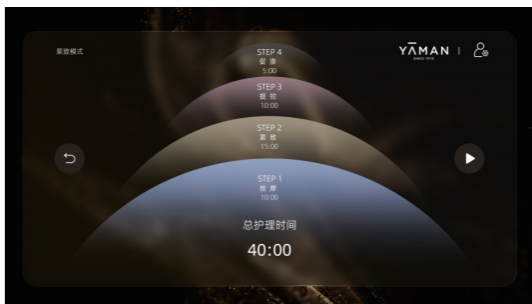


图5-10：紧致模式主页面

①手法按摩+塑升立提按摩霜，护理时长为10-30分钟（如图5-11）。

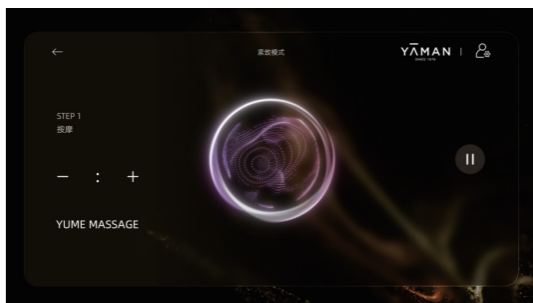


图5-11：紧致模式-手法按摩页面

第五章 操作方法

②紧致手柄+沁肤盈润精华乳，护理时长默认15分钟，可调节至最大时长30分钟（如图5-12）。

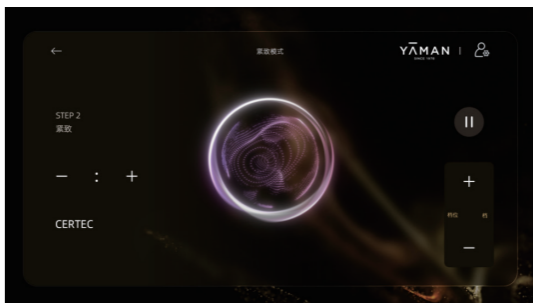


图5-12：紧致模式-紧致手柄页面

③提拉手柄+沁肤盈润精华乳，护理时长默认10分钟，可调节至最大时长30分钟（如图5-13）。

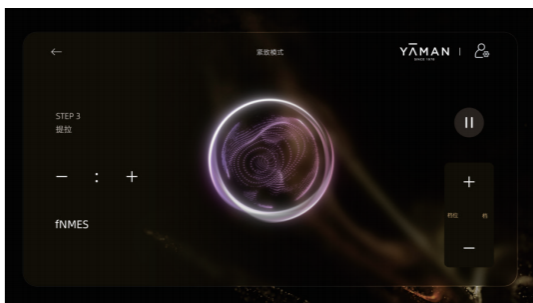


图5-13：紧致模式-提升手柄页面

第五章 操作方法

- ④促渗手柄+塑升立缇精华，护理时长默认5分钟，可调节至最大时长30分钟（如图5-14）。

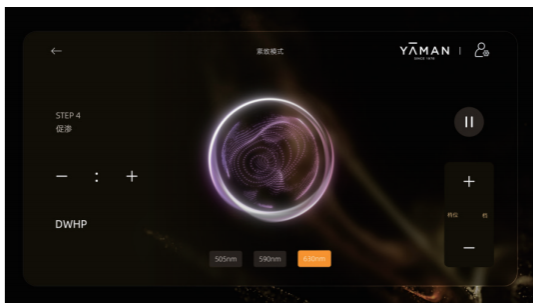


图5-14：紧致模式-促渗手柄页面

焕亮模式

焕亮模式有3大步骤，共需要6次护理，期间间隔建议7-10天/次，一次护理40分钟（如图5-15）。



图5-15：焕亮模式-主页面

第五章 操作方法

①紧致手柄+沁肤盈润精华乳，护理时长默认5分钟，可手动调节至最大时长30分钟（如图5-16）。

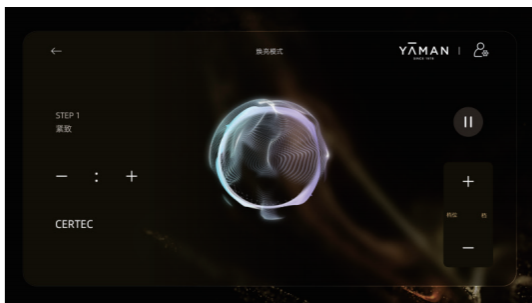


图5-16：焕亮模式-紧致手柄页面

②促渗手柄+匀净焕彩精华液，护理时长默认15分钟，可手动调节至最大时长30分钟（如图5-17）。

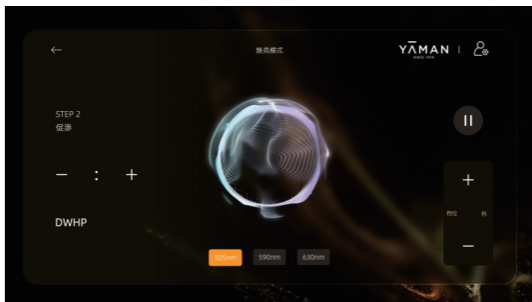


图5-17：焕亮模式-促渗手柄页面

第五章 操作方法

③聚光舱+匀净焕彩精华面膜，聚光舱开机后，手动选择“均色提亮”模式，护理时长默认20分钟，如果屏幕调节增加时长，则聚光舱需要手动重新选择和开启（如图5-18）。

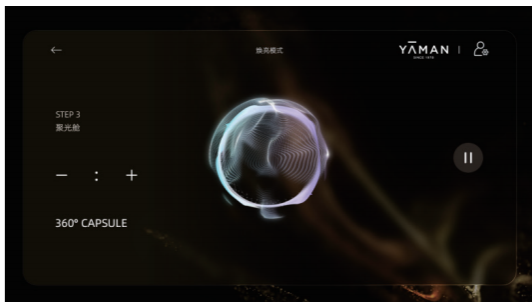


图5-18：焕亮模式-聚光舱页面

● 暂停/结束页面

暂停页面：根据用户需求选择终止护理/跳转下一个流程护理（如图5-19）；当护理时长过半，也会弹出该页面：

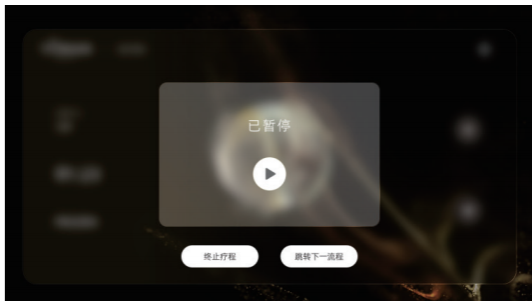


图5-19：暂停页面



第五章 操作方法

■ 护理时间

一般情况下，每个项目护理时间为40分钟；特殊情况可以由美容师决定延长护理时间，具体时间应由美容师根据用户护理的情况确定。

注：各护理模块的护理时间设置不同，具体设置请参照各护理模块部分说明书。

■ 操作程序一览表

常见问题	使用指引
准备	<ul style="list-style-type: none">● 检查电源插座的电压，插上电源线插头● 更换好护理模块
开机	<ul style="list-style-type: none">● 通过电源开关进行开关机
参数设置	<ul style="list-style-type: none">● 详见各护理模块说明书
准备工作	<ul style="list-style-type: none">● 防护眼镜● 在使用聚光舱时，用户需佩戴防护眼镜● 检查水箱是否加水，如没有，需进行加水
护理 (详见各护理模块说明书)	<p>启动</p> <ul style="list-style-type: none">● 按下“启动护理”键，开始护理。 <p>暂停</p> <ul style="list-style-type: none">● 若护理途中因某种原因需暂停护理，此时可按下“暂停护理”键，护理模块停止输出，剩余时间暂停计时；如需要继续进行护理则按“继续护理”键；如要直接中断护理则按“结束疗程”键，此时护理时间回到上一次设置的时间值。 <p>护理完成</p> <ul style="list-style-type: none">● 护理完成后，仪器会自动停止相应工作，同时蜂鸣器发出提示音，提示护理完成。
关机维护	<ul style="list-style-type: none">● 如果长时间不使用设备，应按下电源开关关机，并将电源插头拔出，将仪器移动到安全处，且不易被人员碰倒或撞坏。电源线圈置于台车后面的线架上，不要强硬折弯、扭结、拉紧或压坏。● 长期不使用请将水箱排空

第五章 操作方法

⚠ 注意事项

- 使用聚光舱时，用户必须佩戴防护眼罩。
- 请勿打开设备机箱。
- 必须避免在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮的易燃麻醉气的情况下使用。
- 用于清洗和消毒的溶剂和可燃溶液应该在使用本设备前使其挥发。
- 使用时，如发现有味或烟雾，立即关掉设备，拔掉电源线。
- 设备周围不能有水或其它液体。如果仪器接触到水或其它液体，立即关掉设备，拔掉电源线。
- 如快速把仪器从寒冷环境移到温暖环境中，仪器内可能会发生结露。使用仪器前，请给以充足的时间使其干燥。
- 请勿把仪器直接暴露在阳光下、潮湿的环境中或任何空调机附近。
- 请勿把仪器安装在任何不稳定的位置。
- 护理过程中，应锁紧脚轮。
- 请勿尝试维修主机设备，设备将不会配备用户可以自行维修的元件，也不予授权用户自行维修。

第六章 保养及常见问题解决方法

■ 常见故障排除

主机设备故障时，请立即通知经销商或中国总代理。未经允许用户私自修理拆卸机器而造成的一切不良后果，恕不负责。

常见故障及处理方法见表6-1。

故障	可能的原因	更改建议
屏幕不亮	主电源无电	<ul style="list-style-type: none">● 检查是否联接好● 检查是否开机● 检查主电源保险● 检查灯的保险
触摸屏不准	需要校正	<ul style="list-style-type: none">● 校正触摸屏
护理模块上没有光输出	没有正确地安装护理模块	<ul style="list-style-type: none">● 重新接通护理模块● 与经销商联系
护理过程中护理模块停止光输出	控制器损坏	<ul style="list-style-type: none">● 与经销商联系
扫码后无法跳转至主页面	网络故障	<ul style="list-style-type: none">● 检查是否有网络或网络不稳定● 与经销商联系
扫码后仪器无法进行解锁	网络故障	<ul style="list-style-type: none">● 检查是否有网络或网络不稳定● 与经销商联系
扫码验真故障	网络故障	<ul style="list-style-type: none">● 检查是否有网络或网络不稳定● 与经销商联系
仪器突然关闭	电源松动 设备故障	<ul style="list-style-type: none">● 重启● 重新连接电源线● 与经销商联系
操作过程中断电	电源松动 设备故障	<ul style="list-style-type: none">● 重启● 重新连接电源线● 与经销商联系
手柄无能量输出	设备故障	<ul style="list-style-type: none">● 重启● 检查手柄连接线● 与经销商联系
能量输出异常	设备故障	<ul style="list-style-type: none">● 重启● 与经销商联系
冰敷手柄不制冷	水箱未加水 设备故障	<ul style="list-style-type: none">● 检查是否给水箱加水● 与经销商联系

表6-1 常见故障及处理方法

第六章 保养及常见问题解决方法

注意

- 未经允许，用户不能私自拆卸主机机器修理。

■ 清洁

清洁前，请关闭主电源，拔下插头。

- 护理模块清洁：每天用柔软的无尘布沾水并拧干后擦拭清洁。设备其余部分用湿毛巾沾少量温和的中心清洁剂进行清洁。
- 护理模块消毒：各模块每周用无尘布沾少许75%的酒精进行消毒，勿让酒精渗入护理模块内部。

注意

- 禁止将应用部件放入水中清洁，否则会引发电击，损害敏感电器部件。

■ 水箱保养

- 定期对水箱进行换水，包括排水和重新加水。
- 建议添加纯净水或蒸馏水，防止水箱内长期残留水滋生细菌和水垢，导致水泵等器件破坏。

第七章 安全及注意事项

- 使用前，请仔细阅读“安全注意事项”。请按照规定步骤合理使用。
- 发生异常时，请立即停止使用并联系经销商。
- 不得在仪器故障情况下继续使用。

危险（关于使用）

以下人员请勿使用

- 正在使用以下医用电子仪器人员。
 - > 心脏起搏器等体内植入式医用电子仪器
 - > 人造心肺机等维持生命用医用电子仪器
 - > 心电图描写器等穿戴型医用电子仪器
- 孕期、哺乳期、皮肤开放性创口、重度痤疮、严重皮肤病人群。
- 医美光电术、及针剂注射后一个月内不操作，手术式医美项目后三个月内人群。
- 心脏搭桥、皮肤内置金属的人群。

警告（关于使用）

- 请勿在皮肤较薄或接近骨头的部位长时间使用。否则可能会引起肌肤损伤或人体受伤。
- 请勿过度使用。
- 请严格按照操作说明书规定的使用时间以及使用频率进行护理。否则可能会对身体产生伤害。
- 使用前请确认本体是否有破裂、变形、破损、故障等情况，如有以上情况请勿使用。否则可能会引起肌肤损伤或人体受伤。
- 请勿用于使用说明书中注明以外的用途，否则可能会引起主机故障或人体受伤。
- 未成年人请在征得监护人同意并在陪同下使用，否则可能会引起事故或人员伤害。

第七章 安全及注意事项

⚠ 注意（关于使用和保管）

- 请勿大力按压或集中在一个部位使用,否则可能会引起肌肤损伤。
- 请勿直视LED光源,否则可能会引起眼部不适。
- 请确保正确操作该手柄,勿将护理头在皮肤的同一个位置停留过久,否则可能引发烫伤皮肤的风险。
- 初次使用或未适应之前,请务必从1档开始使用。请勿勉强调高档位。选择适合自身的档位使用,否则可能会引发人体受伤或事故。
- 使用时,请注意肌肤是否有异常。如若使用中感到疼痛、疲劳或肌肤异常,请立即停止使用。次日若情况仍未好转,请咨询专业美容师。
- 开机状态下请勿与其他美容仪器或电器产品接触。
- 请勿与其他的电器产品(电热毯、电暖桌等)同时使用,否则可能会引起事故。
- 请勿用水龙头等强水压冲洗或将本机泡入水中。本产品无法应对强水压的水流冲洗及浸泡,在浴室、厨房等高温高湿场所使用时请务必注意,否则可能会引起本机故障。

⚠ 警告（关于使用和保管）

- 请勿在下列情况下使用保管或给主机充电,否则可能会引起主机故障引发事故或人体受伤。
 - 灰尘较多的地方容易被阳光直射的地方或室外
 - 主机容易倾倒、跌落以及受到碰撞的地方
 - 强电波或磁场的地方燃性物品附近(酒精、稀释剂、汽油、卸甲水、定型喷雾等)
 - 有油烟、易产生水蒸气的地方
- 请勿拆解、修理、改造主机,否则可能造成触电、人体受伤或起火。维修事宜请咨询当地经销商或中国总代理。
 - 中国总代理: 广东倍捷医疗科技有限公司

第七章 安全及注意事项

务必注意

- 请勿用沾湿的双手进行操作，否则可能会引发短路、触电或起火。
- 在地震或打雷的情况下，请关闭电源、拔出插头，否则可能会引起触电或起火。

警告（关于电源）

- 务必使用专用的供电线，否则可能会引起短路、触电或起火。
- 充电线有损伤或松动时，请停止使用，否则可能会引起短路、本体故障、触电或起火。维修事宜请咨询当地经销商或中国总代理。
- 请勿连接超出插座或连线设备额定容量的排线(排插)，否则可能会引起短路、主机故障、触电或起火。

第八章 运输、贮存

● 运输

可用普通运输工具运输，运输中应防止受到剧烈冲击、雨淋、曝晒；运输时应防止剧烈震动和与腐蚀性物质混运。
运输要求按订货合同规定。

● 贮存

护理模块部分均进行了保护包装，设备应储存在干燥通风的环境中。温度 -20°C $\sim +50^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度不超过95%、大气压力：700hPa \sim 1060hPa、无腐蚀性气体和通风良好的室内。

● 搬运说明

首先断开电源，拔下插头，将线整理好。然后松开脚轮卡，拉动把手移动即可。

注意

- 把手仅用于推拉设备，不能通过提、拧把手的方式抬设备，以免损坏把手。

第九章 内置充电锂电池的废弃方式

该章节为针对配件“聚光舱”的内置充电锂电池废弃方法，主机设备请勿自行拆卸。


● 电池取出说明

- 在废弃仪器前，必须将电池从仪器中取出
- 在取出电池时，仪器必须处于断电状态，才可安全地取出电池
- 如需帮助，请联系当地经销商或中国总代理

● 废电池的处理方式

- 交给废电池回收机构，由专业人员回收处理

● 面罩电池取出方法

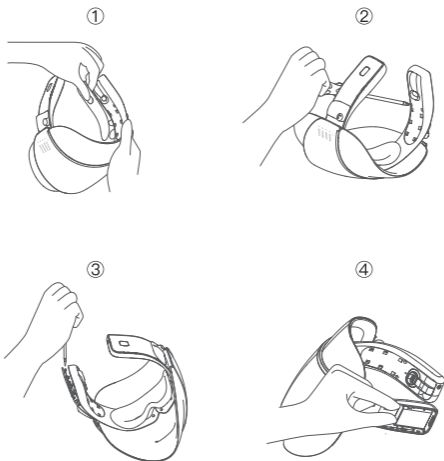

第十章 环保清单

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电线	○	○	○	○	○	○
PCB	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



环保使用期限

此标识指期限(十年),电子产品中含有的有毒有害物质或元素在正常的条件下不会发生外漏或突变,用户使用该电子产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

第十一章 售后服务

■ 参数设置流程

- 设备正常使用过程中如出现故障，自购买当日起1年内保修（耗材、配件除外）。
- 另外，超过保修期后，寄送产品的运输费用由用户自行承担。
- 超过保修期后发生的故障，按实际维修费用收取。
- 保修期内的维修也可能产生费用，请仔细阅读免费维修规定的说明。万一发生故障，请联系当地经销商或中国总代理。

● 免费维修的相关规定

1. 根据使用说明书及本产品上所贴的标签上的相关内容进行使用时所出现的故障，可携带本产品前往购买本产品的经销商处接受免费维修。
2. 保修期间，产品发生故障并需要接受免费维修时，请携带本产品及其保修卡前往购买本产品的经销商处接受免费维修。
3. 住址搬迁时，请提前与购买本产品的经销商联系。
4. 如将本产品送作他人使用而导致本产品无法接受本说明书中所记载经销商的免费维修时，请联系当地经销商或中国总代理。
5. 保修期间，以下情况不属于无偿保修的对象范围：

- (1) 使用不当或不当的维修及改造所造成的故障及损伤
- (2) 电池及消耗品、配件等零部件更换时
- (3) 因以下①-⑩而导致的故障及损伤
 - ① 使用不当
 - ② 购买后，因运输、移动及跌落
 - ③ 不当的维修及改造
 - ④ 在高温、高湿的环境下使用
 - ⑤ 与本产品连接的其他电器设备的异常
 - ⑥ 非一般家用情况（例如：需长时间使用或使用异常电压等的商用情况）
 - ⑦ 使用⑦（若说明书有指定的情况下）用指定以外的方法通电
 - ⑧ 使用非原装部件
 - ⑨ 装载在车辆、船舶上
 - ⑩ 在海外使用
- (4) 火灾、地震、水灾、以及其他自然灾害，环境污染，以及战争和冲突造成的损坏
- (5) 顾客疏忽导致的损伤，如坠落、浸泡、盗窃、遗失等情况
- (6) 当出现改装或者拆卸的迹象时
- (7) 当确认产品使用了我司没有预期的使用方式，或不遵守我司提供的使用说明和安全说明时
- (8) 保修证书或发票未附上时，或当购买日期和销售商名称未填写或盖章，或文字已被改写时
- (9) 当根据我们的销售记录等判断产品被转让、转售，或为二手商品（包括拍卖购买、私人销售或非授权经销商购买等）时
- (10) 当从制造和销售开始过了相当长的时间，修理或更换零部件的安排变得困难时
- (11) 本保修卡中所规定的范围之外的情况

6. 保修地域仅限中国大陆地区。This warranty is valid only in China.

※ 本保修卡对免费维修的时间及条件进行了一定约束，但并非是对客户在法律上应享有的权利进行限制。如对过了保修期的修理尚有不明确之处可向购买本产品的经销商咨询。

因自然使用所导致的本品性能劣化、消耗及消耗品的更换属于无偿保修对象范围外。

※ 保修地域仅限中国大陆地区。

No. _____

保修卡

凭卡修理

型 号	PSM300	
名 称	多效美容仪	
保 修	对 象	时 间
	主机设备 (本体, 不含消耗品)	自购买本产品 当日起一年内
※ 经 销 商	门店名称/地址/联系 <p style="text-align: center;">请贴上标有购买日期的明细 或者将其与本质保书一起保管。</p>	

请经销商将带有※的必填栏填写完毕相关的信息,然后交回客户保管。

本保修卡承诺根据记录的内容免费维修。

左列“免费保修期”内发生故障时,请您携带本产品及保修卡前往购买本产品的经销商进行维修。

- 如果本卡的空白栏中没有按规定填上购买日期或没有购买明细,则此保修卡无效。
- 本保修卡不接受补办,请妥善保管。

制造商

ヤーマン株式会社

邮编:135-0045 东京都江东区古石场1-4-4

日本官网:<https://www.ya-man.com>

中国总代理

广东倍捷医疗科技有限公司

地址:广东省佛山市顺德区盈峰商务中心

客户服务中心:400-931-8556

中国官网:<https://www.ya-manchina.com/>

日本官网

图纸提供单位:

广东花至美容科技有限公司

项目名称:

PSM300N/PSM300P/PSM300T

文件名称 (图号+物料名称+版本号+日期):

PSM300P-04-01-说明书/PSM300-V2.0-20250319

设计工程师:

/

包装工程师:

Tony

审核:

Busy

技术要求

- 1. 尺寸: 100*150mm
2. 材质: 105g哑粉纸;
3. 外观要求, 整本说明书整洁无脏污, 不得有褶皱、漏印、错印、印刷歪斜、字迹不清、内容错误、缺页、多页、纸张破损、装订歪斜等不良; 无异味;
4. 工艺: 印刷, 装订方式为骑马订
5. 其他: \
6. 公差: "※"尺寸为重点管控尺寸, 其他未标注尺寸公差以公差表为准。

Table with 4 columns: 公差表, 物流箱, ±5mm, 彩盒/指南/说明书类, ±1mm, 物流箱垫卡类, ±3mm, 热缩膜/胶袋类, 宽±3mm; 长±10mm, 标签类, ±0.5mm, 珍珠棉类, ±5.0mm

注意: 所有材料必须符合ROHS标准。


更新日志

- 版本 V1.0 初版定稿, 20250206
版本 V2.0 调整稿件以及尺寸材质, 20250319

切线 压线

比例: 1:1 单位: mm


纸箱、坑纸纹理方向

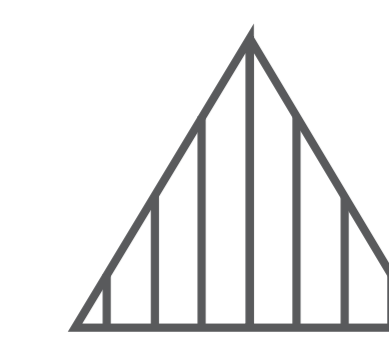

目录
第一章 产品概述 01
第二章 结构组成 02
第三章 工作原理及技术参数 03
第四章 安装与调试 04
第五章 操作方法 05
第六章 保养及常见问题的解决方法 06
第七章 安全及注意事项 07
第八章 运输、贮存 08
第九章 内置锂电池的拆卸方式 09
第十章 环境清洁 10
第十一章 售后服务 11


前言
感谢您选择PSM300多美肤仪!
请仔细阅读本说明书, 以便正确使用。
使用前, 请务必仔细阅读本说明书, 并妥善保管。
如有疑问, 请咨询经销商或拨打服务热线。

第一章 产品概述
PSM300多美肤仪采用最新CART-CC光源技术, 配合专利LED光源, 能深入毛孔, 有效改善肤质。
产品特点:
1. 采用最新LED光源, 亮度高, 使用寿命长。
2. 采用专利LED光源, 亮度高, 使用寿命长。
3. 采用专利LED光源, 亮度高, 使用寿命长。




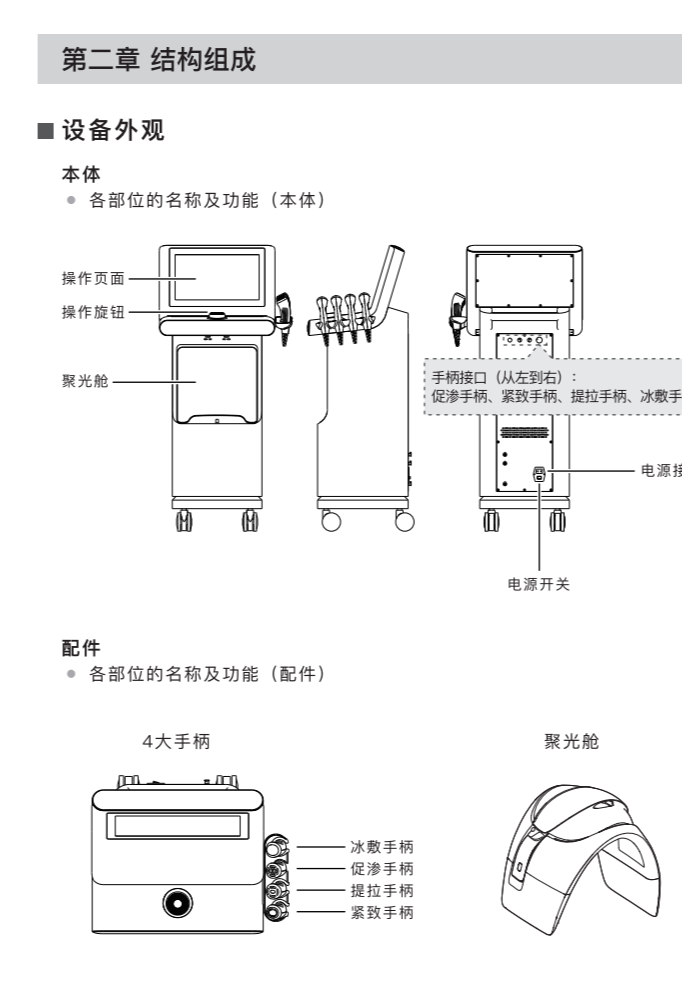


第三章 工作原理及技术参数
工作原理:
PSM300多美肤仪采用最新CART-CC光源技术, 配合专利LED光源, 能深入毛孔, 有效改善肤质。
技术参数:
1. 光源: LED光源
2. 功率: 10W
3. 电压: 220V

第四章 安装与调试
安装步骤:
1. 取出设备, 检查外观是否有损坏。
2. 将设备放入物流箱, 取出设备。
3. 检查设备是否完好, 如有损坏, 请及时联系经销商。

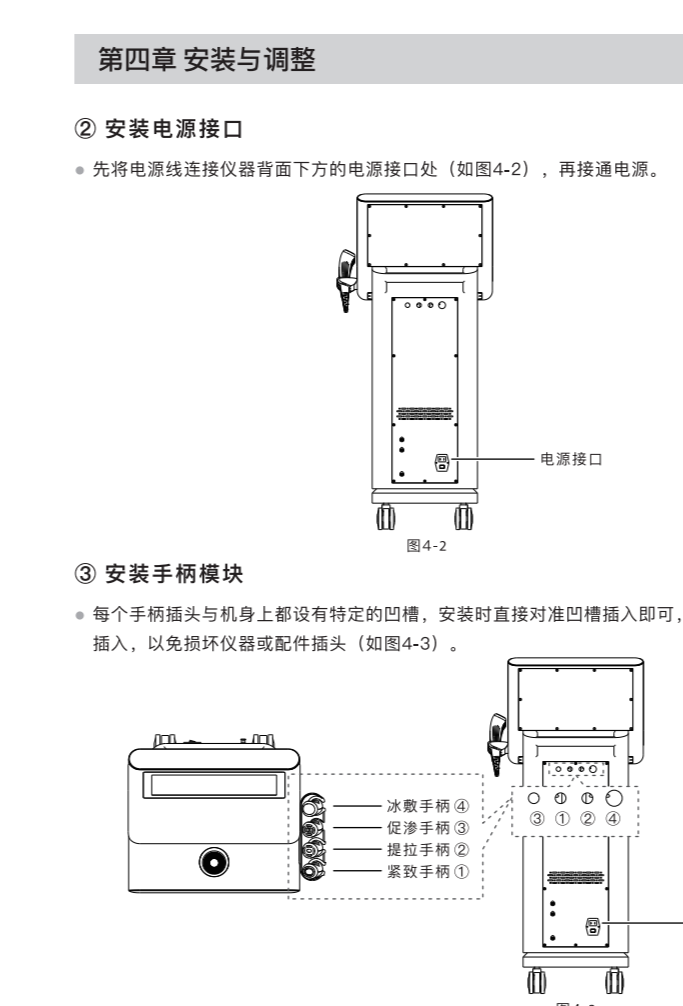

第四章 安装与调试
取出设备, 检查外观是否有损坏。
将设备放入物流箱, 取出设备。
检查设备是否完好, 如有损坏, 请及时联系经销商。

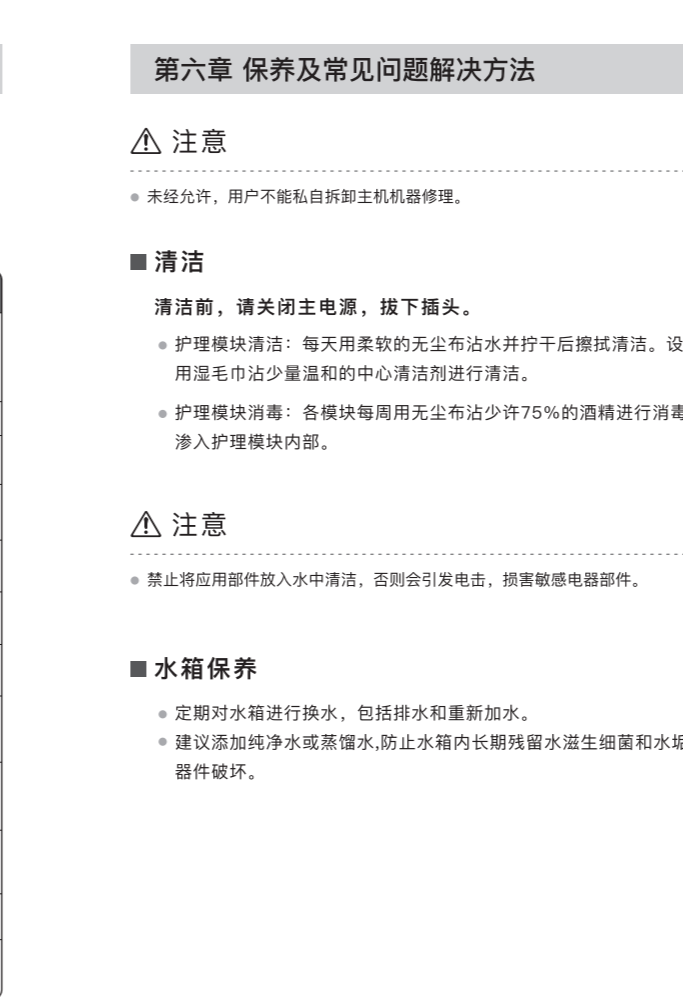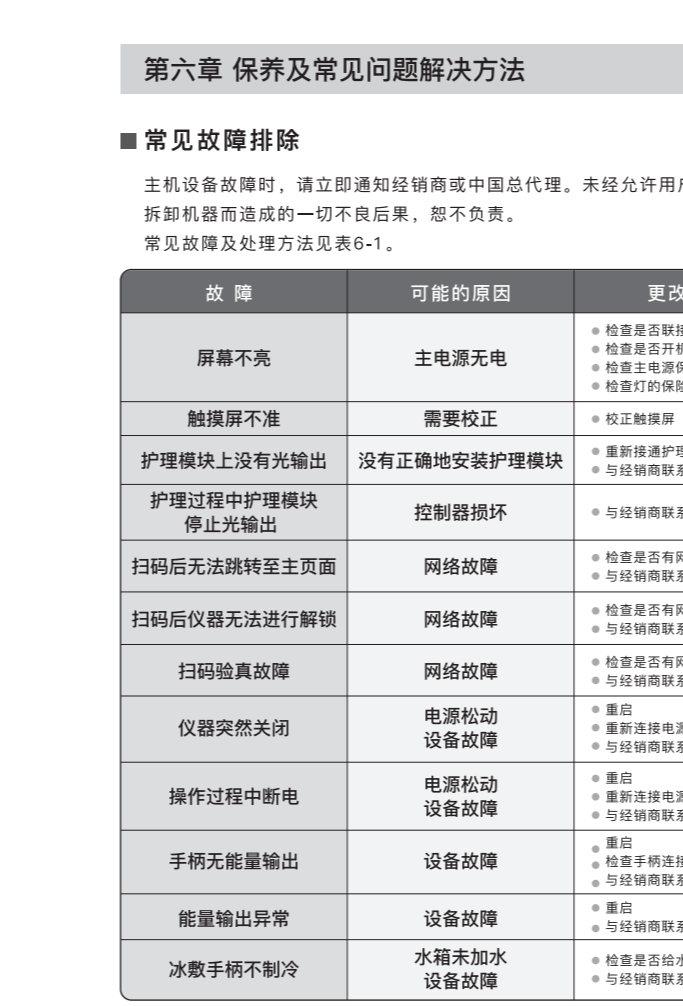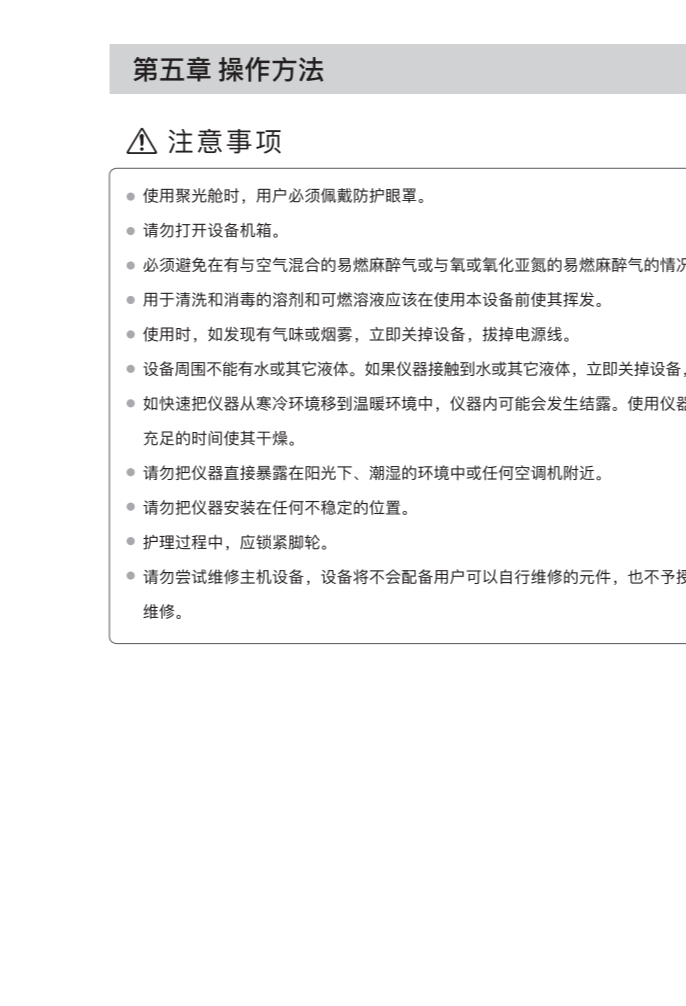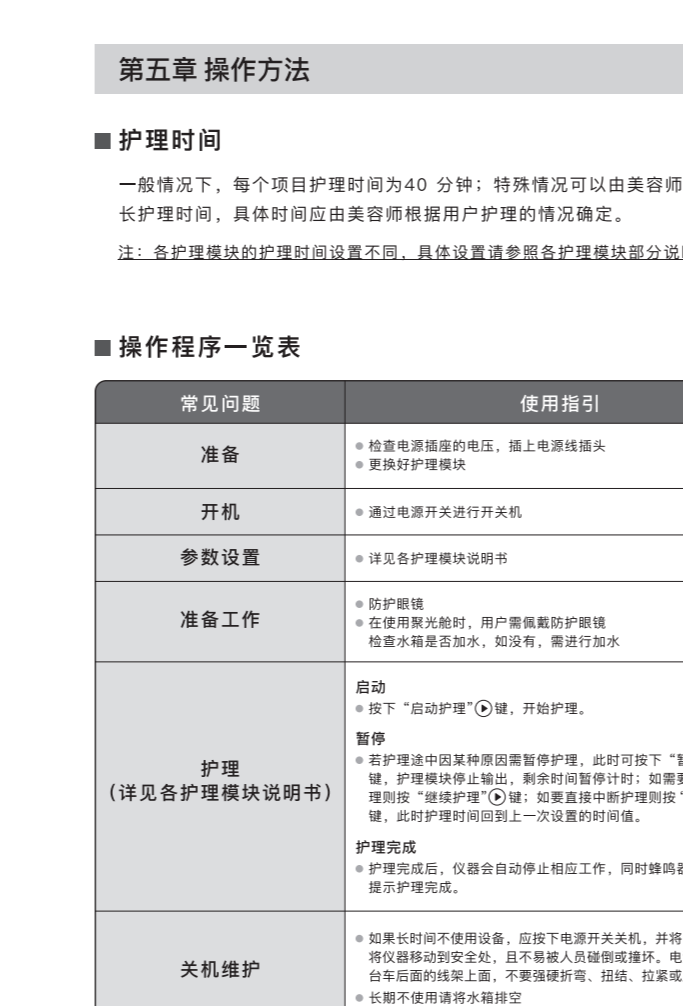


第七章 安全及注意事项
使用前, 请务必仔细阅读本说明书, 并妥善保管。
使用前, 请务必仔细阅读本说明书, 并妥善保管。
使用前, 请务必仔细阅读本说明书, 并妥善保管。


第七章 安全及注意事项
使用前, 请务必仔细阅读本说明书, 并妥善保管。
使用前, 请务必仔细阅读本说明书, 并妥善保管。
使用前, 请务必仔细阅读本说明书, 并妥善保管。

第七章 安全及注意事项
使用前, 请务必仔细阅读本说明书, 并妥善保管。
使用前, 请务必仔细阅读本说明书, 并妥善保管。
使用前, 请务必仔细阅读本说明书, 并妥善保管。

第八章 运输、贮存
运输时, 请务必将设备放入物流箱, 并妥善保管。
运输时, 请务必将设备放入物流箱, 并妥善保管。
运输时, 请务必将设备放入物流箱, 并妥善保管。

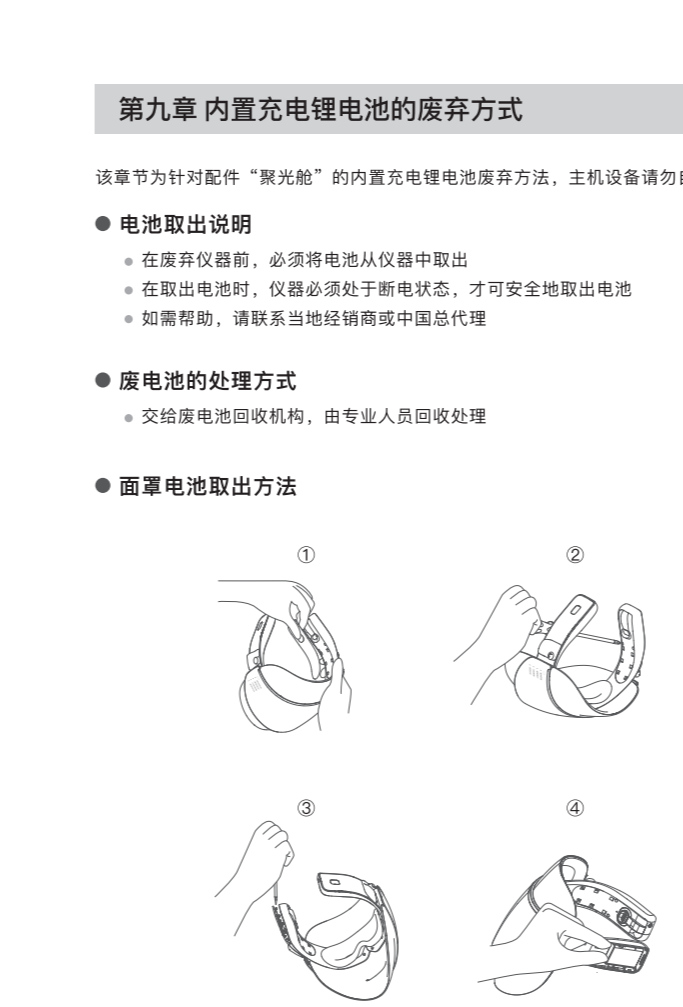

第九章 内置锂电池的拆卸方式
拆卸前, 请务必将设备关机, 并妥善保管。
拆卸前, 请务必将设备关机, 并妥善保管。
拆卸前, 请务必将设备关机, 并妥善保管。

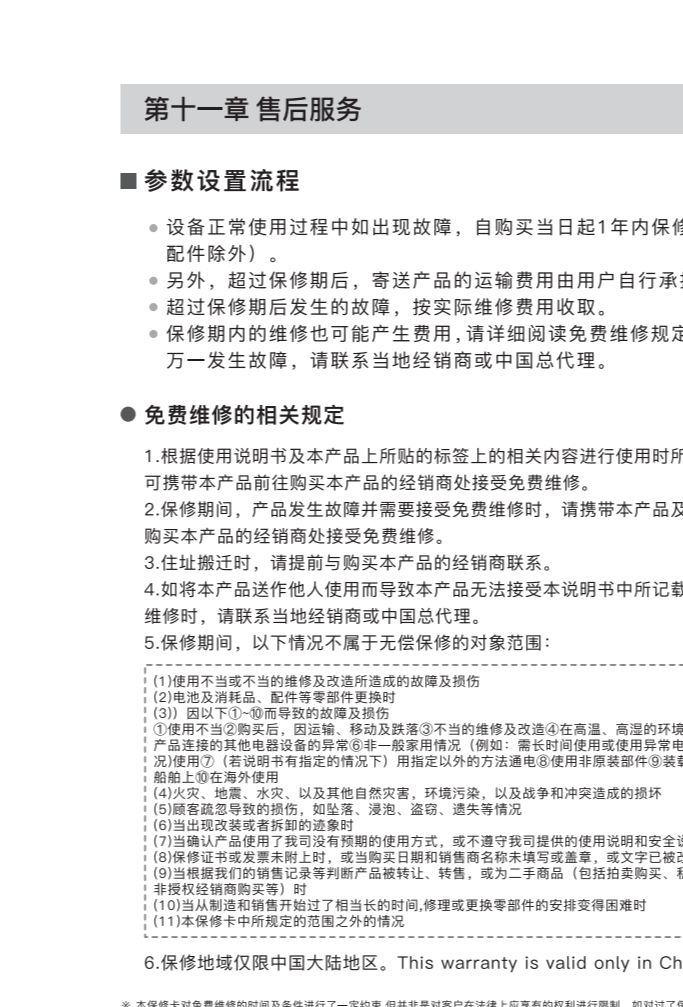

第十章 环境清洁
清洁时, 请务必将设备关机, 并妥善保管。
清洁时, 请务必将设备关机, 并妥善保管。
清洁时, 请务必将设备关机, 并妥善保管。

Table with 2 columns: 保修卡, 保修期限, 保修范围, 保修地点

注意: 所有材料必须符合ROHS标准。

更新日志
版本 V1.0 初版定稿, 20250206
版本 V2.0 调整稿件以及尺寸材质, 20250319

